


CytoSorb. Варианты подключения в контур ЭКМО

Предпочтительные варианты


Запасной вариант

Пассивный контур


Вариант 1a: шунт от "после насоса" до "перед насосом"

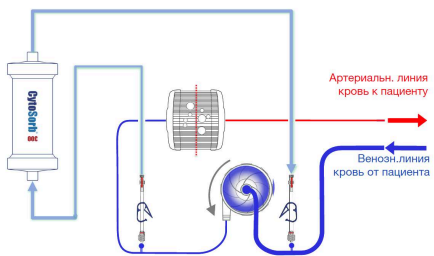

Вариант 1b: шунт от входа в оксигенатор до адаптера перед насосом

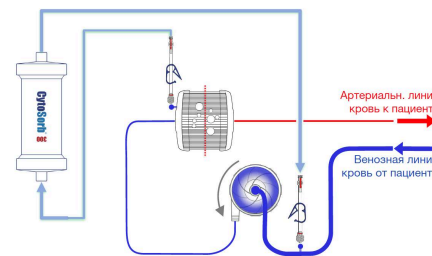


Вариант 1c: шунт от ВЫХОДА оксигенатора к адаптеру перед насосом

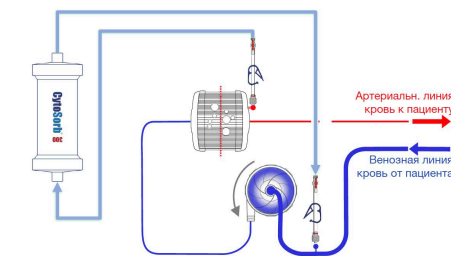


Активный контур


Вариант 2a: Шунт перед центрифужным насосом ЭКМО + насос крови

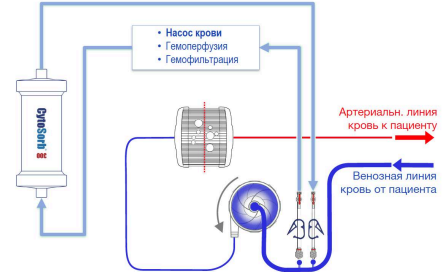

Вариант 2b: Шунт после центрифужного насоса ЭКМО + насос крови

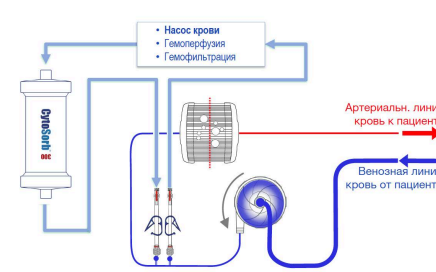


Вариант 2c: Шунт "ВЫХОД оксигенатора - вход оксигенатора" + насос крови

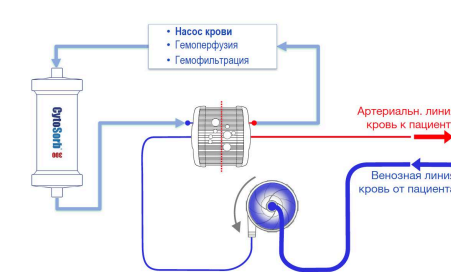

Независимый контур

Вариант 3: Независимый контур/отдельный контур для CytoSorb

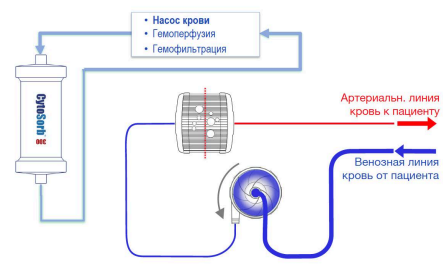

НЕЛЬЗЯ!